

SZ23 Akutel™ HYDROGEL SPRAY 75 g

AKUTOL™ HYDROGEL SPRAY HYDROKOLOIDNÍ GEL NA RÁNY • BEZ PARABENŮ

INDIKACE

Akutel™ HYDROGEL SPRAY je hydrokoloidní gel na rány bez parabenů určený pro péči o lokální suché či vlhké rány. Akutel™ HYDROGEL spray je zdravotnický prostředek, který nepřímo podporuje hojení ran tím, že reguluje mikroprostředí v ráně. Je určen na akutní či chronické rány, jako jsou například:

- povrchové popáleniny
- odřeny
- chirurgické rány
- proleženiny (dekubity)
- otevřené rány na dolních končetinách (vředy)

Akutel HYDROGEL spray se může rovněž používat na vředy a rány vzniklé v souvislosti se syndromem diabetické nohy. Pacienti s diabetem, kteří mají problémy s dolními končetinami, by se měli poradit s lékařem, než začnou Akutel HYDROGEL spray používat.

VLASTNOSTI A SLOŽENÍ

Akutel™ HYDROGEL SPRAY obsahuje kyselý karbomer stabilizovaný karnosinem, což je zásaditý peptid přirozeně se vyskytující v pokožce. Aplikace tohoto karbomeru na suché rány, jako jsou odřeny a chirurgické rány má okluzivní účinek: brání odpařování vlhkosti a snižuje ztrátu tekutin přes epidermis. Karnosin působí jako pufr na kyselé polymery a má také antioxidační účinky. Karbomer absorbuje přebytečnou tekutinu z vlhkých, exsudativních ran. Akutel™ HYDROGEL spray má chladivé účinky, vytváří měkkou kontaktní plochu s náplastí či obvazem a je nelepivý.

Složení

kyselý koloidní karbomer, karnosin, voda, benzoát sodný, sorban draselný.

NÁVOD K POUŽITÍ

Uzavřené rány

- očistěte a vydezinfikujte plochu, kterou budete ošetřovat
- naneste Akutel™ HYDROGEL spray na ránu, aniž byste se jí dotkli nádobkou
- v případě potřeby přikryjte obvazem či náplastí

Otevřené rány

- ránu očistěte a vydezinfikujte
- opatrně poklepáním osušte
- naneste na ránu silnou vrstvu (0,5–0,75 cm), aniž byste se jí dotkli nádobkou
- přikryjte obvazem či náplastí
- nejméně jednou denně potřete novou vrstvou gelu a vyměňte obvaz či náplast
- jakmile se na ráně objeví strup, omezte použití Akutel Hydrogel spraye

Pozor – Popáleniny: nejprve chlazení vodou, až poté další kroky.

Akutel™ HYDROGEL SPRAY není prvním opatřením v případě popálenin! Ihned ránu začněte ochlazovat vlažnou tekoucí vodou po dobu asi dvaceti minut. To je třeba provést co nejrychleji, protože příznivý účinek se postupem času snižuje a asi po 30 minutách zcela mizí. Aby nedošlo k podchlazení, nedoporučuje se použít studenou vodu, zejména pokud je popálena velká plocha těla. Akutel™ HYDROGEL spray použijte později, až po správném vyhodnocení závažnosti popálenin. Akutel™ HYDROGEL spray může být používán na povrchové popáleniny: popáleniny postihující epidermis anebo dermis, které se obvykle projevuje otokem, zarudlou pokožkou a puchýři.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

Přípravek nepoužívejte v případě přecitlivělosti nebo alergie na kteroukoliv ze složek. Ve velmi vzácných případech bylo hlášeno podráždění pokožky. Pokud se objeví podráždění nebo alergická reakce, ihned zastavte léčbu. Nepoužívejte Akutel HYDROGEL spray na obličej, oči, oční víčka ani na sliznice.

Vždy se poraďte s lékařem

- v případě větších, rozsáhlejších nebo velmi hlubokých ran
- v případě malých, vysoce infikovaných ran
- v případě pomalu se hojících ran nebo při riziku komplikací.

V takových případech může Akutel™ HYDROGEL spray pomoci, ale rozhodně nestačí jako jediný způsob léčby.

Pouze pro zevní použití.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí data použitelnosti (uvedeno na obalu).

UCHOVÁVÁNÍ

Výrobek uchovávejte při teplotách od 5 °C do 25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

BALENÍ

Akutel HYDROGEL spray je k dispozici jako sprej, dávkovač nebo tuba.

Na trhu se nemusí vyskytovat všechny typy balení.

První stříknutí u nového výrobku může být velmi silné.

Nejprve sprej vyzkoušejte (například na pootevřené ruce) až poté použijte na ránu.

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na žhavé předměty. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Chraňte před slunečním světlem a nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C.

3 znamená, že dávkovač splňuje požadavky směrnice Rady 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích a jejich příloh.

SZ23 Akutol™ HYDROGEL SPRAY 75 g

POSLEDNÍ AKTUALIZACE TÉTO PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Březen 2019



Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke
BELGIUM

DISTRIBUTOR

AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno,
Česká republika, www.akutol.cz

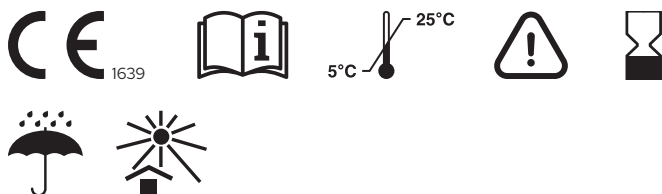

1574/620377/19C/07020476/0

AKUTOL™ HYDROGEL SPRAY BEZ PARABENŮ BEZ PARABÉNOV

- povrchové popáleniny / povrchové popáleniny
- odřeniny / odreniny
- proleženiny / preležaniny
- otevřené rány na dolních končetinách /
otvorené rany na dolních končatinách



Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke
BELGIUM

DISTRIBUTOR

AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno,
www.akutol.cz

DISTRIBÚTOR PRE SR

AVEPHARMA, s. r. o., POLUS TOWER, Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava, www.avepharma.eu

Neobsahuje parabeny / Neobsahuje parabény

CZ/VAROVÁNÍ:

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespálujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na žhavé předměty. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

SK/VAROVANIE:

Nádoba je pod tlakom: po zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé povrchy. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávajte mimo dosahu detí.

EAN 8594013702430
1574/630484/19C/07030507/0